



KDB **GLIDE**®


La *précision* entre vos mains*






Le couteau KDB Glide® permet une excision précise du trabéculum pour accéder aux canaux collecteurs

RAMPE & DOUBLE LAME

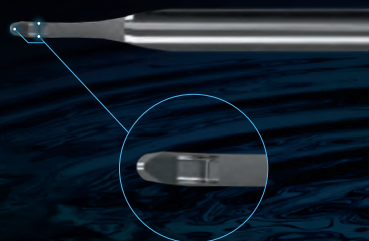

TALON ARRONDI

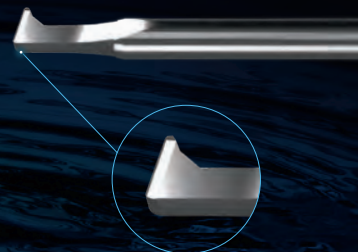

Le couteau KDB Glide® est utilisé pour créer une ouverture du canal de Schlemm en réalisant une goniectomie excisionnelle

Rampe et double lame : La rampe permet la mise en tension du trabéculum et la double lame la réalisation de deux incisions parallèles pour obtenir une excision précise du trabéculum.


Talon arrondi : Passage atraumatique dans le canal de Schlemm lors de la goniectomie excisionnelle.




La *précision* entre vos mains*

Le KDB Glide® permet de réaliser une goniotomie excisionnelle sur 90° à 120° et de traiter le glaucome sans poser d'implant*.



Technique MARK and MEET**

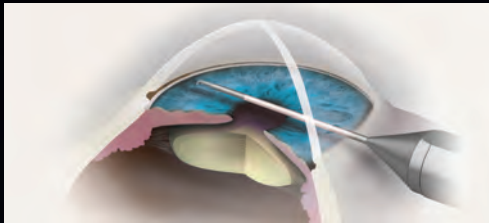



ETAPE 1 Introduire le couteau KDB Glide® via l'incision cornéenne après avoir rempli la chambre antérieure de viscoélastique.

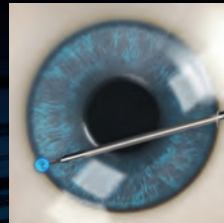


ETAPE 2 Sous contrôle gonioscopique, faire une incision dans le trabéculeum avec la pointe du couteau KDB Glide incliné à 10° pour marquer le point final "MARK" de l'excision.

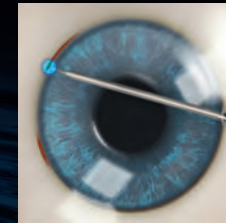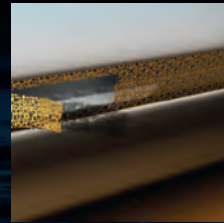


ETAPE 3 Retirer la pointe du couteau et l'engager une nouvelle fois à 90° ou 120° de distance de l'incision "MARK" en inclinant la pointe du KDB Glide® à 10°.

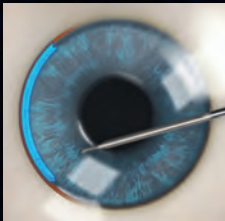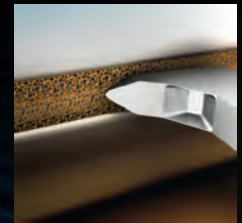

ETAPE 4 Lorsque le KDB Glide® est re-engagé, poser le talon, puis avancer la double lame jusqu'à rejoindre la marque initiale.

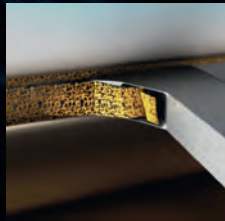

ETAPE 5 (optionnelle) Retirer le tissu excisé à l'aide d'une pince puis irriguer / aspirer le produit viscoélastique en chambre antérieure.

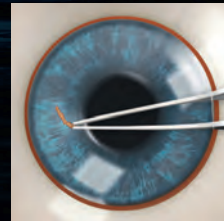

SCANNER le QR code pour voir la procédure.



* Al Habash A, Albuainain A. Long term outcome of combined phacoemulsification and excisional goniotomy with the Kahook Dual Blade in different subtypes of glaucoma. Sci Rep. 2021 May 21;11(1):10660.

** 2 autres techniques sont possibles : la technique Outside-In et la technique Inside-out (vidéos sur www.newworldmedical.com)



CHIRURGIE COMBINEE
CATARACTE



CHIRURGIE SIMPLE



POUR LES GLAUCOMES DEBUTANTS,
MODERES OU SEVERES



Pour tout renseignement : Tél. 01 53 98 98 98
fci@fci.fr

ou rendez-vous sur www.fci.fr

Le KDB GLIDE[®], de classe IIa, est distribué par FCI S.A.S. et fabriqué par New World Medical, Inc. (Organisme notifié: GMED Groupe LNE N°0459)

FCI22/005 Ind A - Mai 2022 - Société par Actions Simplifiées au capital de 46 909 € - SIREN 351 670 385 - RCS PARIS.