
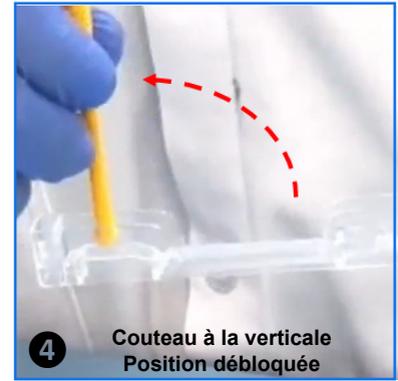
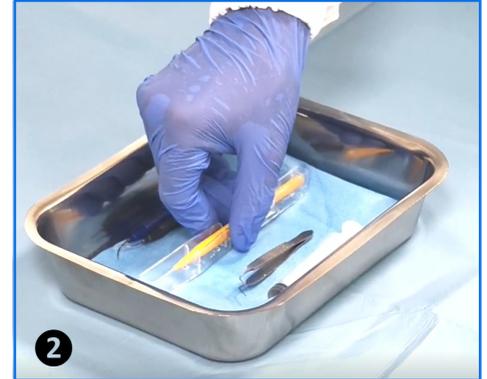


Préparation sur table

Après ouverture du sachet ①, déposer le couteau dans son support de protection plastique sur la table opératoire ②.

Le support plastique permet de protéger le tranchant, la pointe de la lame et les mains de l'aide opératoire.

Pour retirer le couteau de son support de protection, le saisir par le manche en s'appuyant sur l'arrière du manche ③ et relever le couteau à la verticale ④.

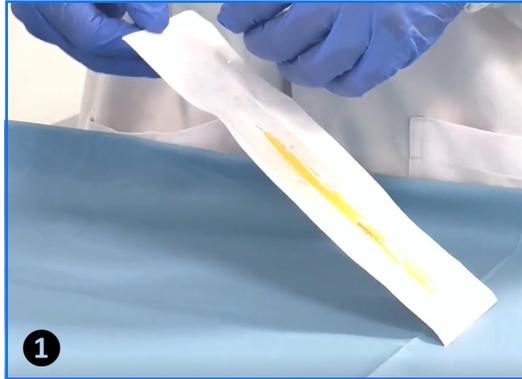

Couteau à la verticale
Position débloquée

Conseils pour protéger la lame entre 2 utilisations :

A NE PAS FAIRE 




Poser le couteau sur le champ de table

RECOMMANDATIONS 



Poser le couteau sur le support de protection - 2 positions recommandées

En fin d'intervention, suivre votre protocole DASRI habituel.

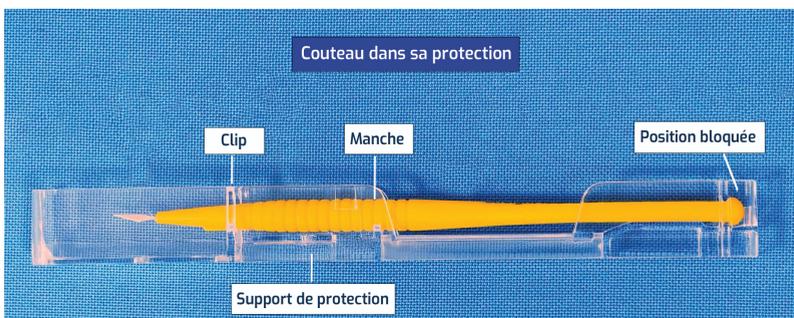

Vidéo 

Pour tout renseignement, contacter le responsable régional FCI
ou notre service commercial : Tél. 01 53 98 98 98 - fci@fci.fr